



JACK PCL BRACE

Referencia

88

Ortesis Dinámica de Rodilla para alivio del Ligamento Cruzado Posterior (LCP).

CARACTERÍSTICAS:

- Desplazamiento constante de la fuerza independiente del ángulo de flexión.
- Tensión ajustable de forma independiente de los resortes.
- La tensión del resorte puede ser activada o desactivada sin la necesidad de usar herramientas.
- La activación o desactivación de la tensión del resorte no varía el nivel de tensión fijado.
- Las correas y componentes del muslo y gemelo pueden ser ajustadas individualmente.
- Fácil colocación y máximo confort de uso.
- Permite inmovilización temporal.
- Opcionalmente disponible con o sin limitación en flexión y extensión.


FUNCIONAMIENTO DE LA ORTESIS:

- La Jack PCL Brace está diseñada para mitigar la gravedad en la parte inferior de la pierna, aliviando el ligamento cruzado posterior.
- La fuerza de traslación puede adaptarse en función de la pierna y peso del paciente a través del ajuste de la tensión a ambos lados de la ortesis.
- Contrarresta los efectos adversos de las fuerzas de la gravedad y del músculo.
- También se inhibe el desplazamiento de la tibia por debajo del fémur en la prueba del cajón posterior.


INDICACIONES:

- Rotura del Ligamento Cruzado Posterior (LCP).
- Rotura parcial así como estiramiento del Ligamento Cruzado Posterior (LCP).

CONCEPTO JACK PCL BRACE:

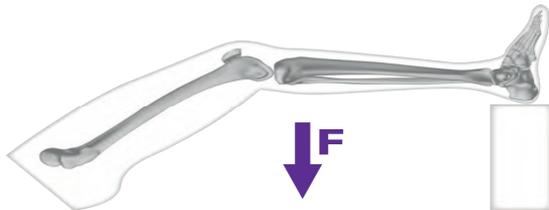

PROBLEMA: Posición de cajón posterior causada por la gravedad o la activación de los músculos isquiotrocúreos.

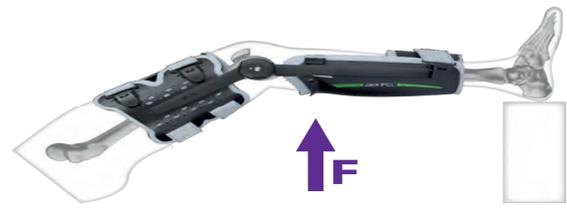

SOLUCIÓN: Fuerza anterior de traslación constante.



TALLA	REFERENCIA		LONGITUD DESDE MITAD DE RODILLA HASTA PARTE SUPERIOR DEL COMPONENTE DE MUSLO	LONGITUD DESDE MITAD DE RODILLA HASTA PARTE INFERIOR DEL COMPONENTE DE PANTORRILLA	CIRCUNFERENCIA DE MUSLO	CIRCUNFERENCIA DE GEMELO
	IZQUIERDA	DERECHA				
S/XS	885SXS-L	885SXS-R	17,5-20 cm	24 cm	30-40 cm	22-27 cm
M/S	885MS-L	885MS-R	18,5-21 cm	26 cm	36-66 cm	27-33 cm
M/M	885MM-L	885MM-R	18,5-21 cm	27 cm	36-66 cm	33-40 cm
M/L	885ML-L	885ML-R	18,5-21 cm	29 cm	36-66 cm	40-48 cm
LM/S	885LMS-L	885LMS-R	23-25,5 cm	31 cm	33-43 cm	27-33 cm
L/S	885LS-L	885LS-R	23-25,5 cm	31 cm	36-66 cm	27-33 cm
L/M	885LM-L	885LM-R	23-25,5 cm	32 cm	36-66 cm	33-40 cm
L/L	885LL-L	885LL-R	23-25,5 cm	34 cm	36-66 cm	40-48 cm