


**SISTEMA MODULAR ARC (COMPLEMENTO DEL  
SISTEMA NEWPORT 3)**
**Referencia**      **367**

El kit ARC Newport es un componente modular opcional diseñado para proporcionar al miembro afectado, un control adicional en rotación interna / externa, eliminando la necesidad de emplear otras ortesis complementarias

**CARACTERÍSTICAS:**

- El kit ARC Newport puede ser empleado como accesorio en cualquier ortesis de cadera Newport.

**INDICACIONES:**

- Artroplastias primarias o de revisión de cadera con riesgo de dislocación en dirección anterior o posterior.

TALLA	REFERENCIA		ALTURA RODILLA-SUELO
	IZQUIERDA	DERECHA	
S	3670	3673	38 cm
M	3671	3674	43 cm
L	3672	3675	48 cm

**PRECAUCIONES:** La primera colocación del producto ha de ser llevada a cabo siempre por un profesional con experiencia en adaptación de productos ortopédicos, el cual además deberá de transmitir las apropiadas indicaciones de uso del producto durante el proceso de rehabilitación.

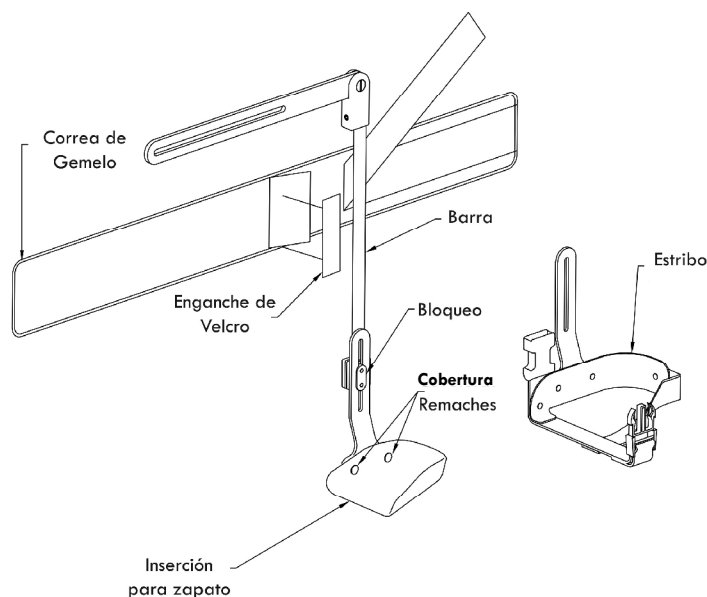
El soporte deberá de ser ajustado de modo que la ortesis resulte cómoda y confortable, sin obstaculizar la circulación ni generar molestias derivadas de un exceso de compresión.

En caso de incomodidad acentuada, se ruega interrumpir el uso del producto y contactar con el profesional ortopeda que realizó la colocación.

Es recomendable revisar periódicamente el producto para detectar cualquier tipo de desgaste o desperfecto. En caso de cualquier problema que pudiera afectar a la funcionalidad del producto, se ruega contactar con el establecimiento donde se adquirió el artículo.

**INDICACIONES IMPORTANTES:** Este producto está destinado a un uso por un único paciente.

Las modificaciones indebidas del producto y/o el uso distinto para el que el producto arriba citado está destinado, eximen al fabricante de cualquier responsabilidad.


**COLOCACION:**

1. Asegurarse de la elección de la talla correcta en base a la altura desde la rodilla hasta el suelo. Dado que la ortesis guarda lado, es necesario tener en cuenta si el soporte se va a aplicar sobre el lado izquierdo o derecho.
2. Para fijar permanente la correa del gemelo a la barra, pegar el enganche de velcro a la altura deseada.
3. Para intercambiar la inserción para el zapato por el estribo, retirar los dos tornillos "allen" e incorporar el estribo, usando de nuevo los mismos tornillos para fijarlo a la barra.