



ACTIMOVE CLAVÍCULA CONFORT

Referencia **4686**

Ortesis confortable y funcional para fracturas de clavícula. Su diseño en forma de mochila, empuja los hombros hacia atrás para alinear la clavícula o proporcionar soporte postural. Muy cómoda incluso cuando el usuario se reclina.

INDICACIONES:

- Tratamiento post-operatorio y postraumático de fracturas de clavícula.
- Tratamiento conservador de las fracturas.
- Vendaje post-operatorio.

TALLA	REFERENCIA	CONTORNO PECHO
XS	46862-1	50-65 cm
S	46863-1	65-80 cm
M	46864-1	80-95 cm
L	46865-1	95-110 cm
XL	46866-1	110-125 cm

PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR LAS BARRAS DE CONEXIÓN AXILO-ILIACAS EN EL CORSÉ MODULAR T2780

- **Paso 1:** Colocar el corsé en posición vertical. (Imagen 1)
- **Paso 2:** Retirar todo el acolchado a excepción de las almohadillas paravertebrales de tal modo que el marco de la estructura de soporte pélvica y axilar quede totalmente libre. (Imagen 2)
- **Paso 3:** Dependiendo del grado de extensión en el cual desea colocar el corsé, lo cual determina la posición del tronco del paciente, es preciso identificar los puntos en donde se realizarán los agujeros, tanto en la estructura pélvica como en la estructura axilar. En estos puntos serán donde se sitúen los tornillos que fijarán la barra de conexión. (Imagen 3)
- **Paso 4:** Volver a colocar todo el acolchado poniendo un especial cuidado en realizar un corte para la fijación de la barra de conexión. (Imagen 4)
- **Paso 5:** Colocar las bisagras laterales en ambos lados y apretar los tornillos. (Imagen 4)

