

Europea de Fabricados Médicos y Ortopédicos nace en el año 92 con el objetivo de establecer un nuevo estándar de calidad e innovación en el suministro de productos y servicios ortopédicos.

Toda la experiencia acumulada a lo largo de estos años nos ha servido para adquirir una visión muy clara de cuales son las verdaderas necesidades a considerar en el campo de la salud.

Concebimos cada producto o servicio que integra nuestra oferta como una solución a un problema. La colaboración de los mejores proveedores internacionales y la confianza de nuestros más de mil clientes son los datos que mejor avalan nuestra trayectoria.



Nuestro eslogan "Compartimos Soluciones" es el mejor testimonio de la orientación de nuestra empresa a satisfacer las cada día más exigentes necesidades, lo cual sin duda alguna para nosotros implica ir siempre un paso por delante.

Para más información:

 985 51 21 22
  985 51 21 57  
 [info@efmo.com](mailto:info@efmo.com)  
 [www.efmo.com](http://www.efmo.com)

# Ortesis Cervical Rígida Universal

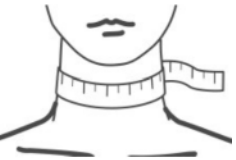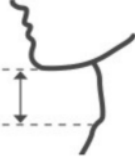

	REFERENCIA	
25-48 cm	OC-000	9-15 cm
REPUESTO FORROS	OC-REP	UNIVERSAL



25% Poliester, 10% Nylon, 15% Foam PU, 50% Plástico



**INDICACIONES:**

- Inmovilización en post-operatorios.
- Espondilitis aguda.
- Síndromes cervicales severos.
- Hernias en discos cervicales.
- Fracturas estables en vértebras cervicales.

**PRECAUCIONES:**

- Asegurarse de que el borde posterior del componente de la barbilla no presiona la garganta del paciente.
- Tenga cuidado en que el soporte para el cuello no se coloca demasiado ajustado como para interferir con la respiración.
- Antes de colocar la ortesis cervical rígida universal, asegurarse de aplicar los procedimientos adecuados de cuidado en posibles heridas o áreas infectadas.
- Este producto ha sido diseñado y testeado para su uso en un solo paciente.

**COLOCACIÓN DEL DISPOSITIVO:**

Estas instrucciones son solo directrices a tener en cuenta en la colocación del dispositivo. Siga las instrucciones de un profesional médico cualificado. El uso de este producto en condiciones de carácter agudo ha de ser prescrito por un doctor.

1. Mantener la cabeza con una alineación neutral y colocar el panel trasero detrás de la cabeza del paciente, deslizándolo con cuidado hacia el centro.
2. Ajustar la altura del collarín en función de la altura del cuello del paciente. Tire de los botones verdes hacia el exterior, ajustando la posición de acuerdo a la valoración estimada. Finalmente pulsar los botones verdes de nuevo para bloqueo.
3. Colocar el panel frontal bajo la barbilla del paciente y sobre el pecho.
4. Con la mano situada sobre el panel frontal de forma que se ejerza una suave presión, fijar las correas del panel posterior en los ganchos laterales para su fijación.
5. Repetir el paso dos si es preciso un ligero reajuste de la altura.

**INSPECCIÓN:**

La cabeza del paciente ha de estar en alineación central de modo que la barbilla se soporte en el componente específico de la ortesis.

Se puede ajustar la altura y circunferencia de la ortesis para adaptarse a los posibles cambios de posición que requiera el paciente durante el tratamiento.

**CUIDADO Y LIMPIEZA :**

Separe las almohadillas de foam de la ortesis, las cuales se pueden lavar a máquina a 30° o a mano con agua tibia. Enjuagar bien y dejar secar a temperatura ambiente. Limpiar las partes plásticas con un paño húmedo.