



PRÓTESIS DE MAMA SIMÉTRICA LIGERA

Referencia	701L
------------	------

Prótesis de mama simétrica en forma de lágrima un 30% más ligera, adaptable a cualquier tipo de pecho. La extensión se coloca bajo el brazo.

Fabricada en gel de silicona extra flexible y ligero que facilita el ajuste a todos los movimientos del cuerpo.

La prótesis dispone de una configuración anatómica y textura muy parecida a la mama natural. Se puede colocar directamente sobre la piel, adquiriendo rápidamente la temperatura corporal, o dentro de la funda de algodón, lo que ayuda a proteger las pieles más sensibles de las irritaciones por roce.

COMPOSICIÓN: 100% silicona

TALLA*	REFERENCIA
75	701L-075
80	701L-080
85	701L-085
90	701L-090
95	701L-095
100	701L-100
105	701L-105
110	701L-110
115	701L-115
120	701L-120
125	701L-125
130	701L-130

PRECAUCIONES: La primera colocación del producto ha de ser llevada a cabo siempre por un profesional con experiencia en adaptación de productos ortopédicos, el cual además deberá de transmitir las apropiadas indicaciones de uso.

La prótesis de mama deberá de ser colocada de modo que resulte cómoda y confortable sin generar molestias.

En caso de molestias e incomodidad acentuada, se ruega interrumpir el uso del producto y contactar con el profesional ortopeda que realizó la colocación.

Es recomendable revisar periódicamente el producto para detectar cualquier tipo de desgaste o desperfecto. En caso de cualquier problema que pudiera afectar a la funcionalidad del producto, se ruega contactar con el establecimiento donde se adquirió el artículo.

INDICACIONES IMPORTANTES: Este producto está destinado a un uso por un único paciente.

Las modificaciones indebidas del producto y/o el uso distinto para el que el producto está destinado, eximen al fabricante de cualquier responsabilidad.

A fin de que este producto tenga una larga vida y funcionalidad, la prótesis no debe ponerse en contacto con productos cosméticos, tales como desodorantes, perfumes o lociones, los cuales pueden causar daños en la silicona. Es importante aplicarse estos productos antes de colocar la prótesis, esperando un tiempo prudencial para que evaporen o sean absorbidos por la piel.

Cuando no se esté usando, la prótesis se ha de guardar en su embalaje original para mantener el producto en óptimas condiciones.

***TALLA EUROPEA**

COLOCACION:

1. Asegurarse de la elección de la talla correcta. Las prótesis de mama Máxima están disponibles en varias formas y tamaños (en función de la talla de sostén).
2. La prótesis de mama se puede colocar directamente sobre la piel, adquiriendo rápidamente la temperatura corporal del cuerpo, o dentro de la funda de algodón para proteger las pieles sensibles de irritaciones por roce.
3. Ponga un especial cuidado en la colocación, ya que una caída puede generar daños o roturas en la prótesis.
4. La prótesis se ha de usar con sostenes especiales diseñados para tal efecto.
5. Los objetos afilados, tales como agujas, imperdibles o broches, son susceptibles de generar daños en la prótesis, sobre todo al perforar la capa externa del producto.
6. La prótesis no se ha de usar durante sesiones de radioterapia, ni ser expuesta a temperaturas altas.

CUIDADOS Y LIMPIEZA: Lavar a mano con agua tibia y jabón suave y secar con una toalla suave.