



PRÓTESIS DE MAMA TRIANGULAR

Referencia 712

Prótesis de mama simétrica con forma triangular. Con base ancha, esta prótesis está recomendada para mujeres de gran pecho y busto plano.

Fabricada en gel de silicona extra flexible y ligero que facilita el ajuste a todos los movimientos del cuerpo.

La prótesis dispone de una configuración anatómica y textura muy parecida a la mama natural. Se puede colocar directamente sobre la piel, adquiriendo rápidamente la temperatura corporal, o dentro de la funda de algodón, lo que ayuda a proteger las pieles más sensibles de las irritaciones por roce.

COMPOSICIÓN: 100% silicona

TALLA*	REFERENCIA
70	712-070
75	712-075
80	712-080
85	712-085
90	712-090
95	712-095
100	712-100
105	712-105
110	712-110
115	712-115
120	712-120
125	712-125
130	712-130

*TALLA EUROPEA

PRECAUCIONES: La primera colocación del producto ha de ser llevada a cabo siempre por un profesional con experiencia en adaptación de productos ortopédicos, el cual además deberá de transmitir las apropiadas indicaciones de uso.

La prótesis de mama deberá de ser colocada de modo que resulte cómoda y confortable sin generar molestias.

En caso de molestias e incomodidad acentuada, se ruega interrumpir el uso del producto y contactar con el profesional ortopeda que realizó la colocación.

Es recomendable revisar periódicamente el producto para detectar cualquier tipo de desgaste o desperfecto. En caso de cualquier problema que pudiera afectar a la funcionalidad del producto, se ruega contactar con el establecimiento donde se adquirió el artículo.

INDICACIONES IMPORTANTES: Este producto está destinado a un uso por un único paciente.

Las modificaciones indebidas del producto y/o el uso distinto para el que el producto está destinado, eximen al fabricante de cualquier responsabilidad.

A fin de que este producto tenga una larga vida y funcionalidad, la prótesis no debe ponerse en contacto con productos cosméticos, tales como desodorantes, perfumes o lociones, los cuales pueden causar daños en la silicona. Es importante aplicarse estos productos antes de colocar la prótesis, esperando un tiempo prudencial para que evaporen o sean absorbidos por la piel.

Cuando no se esté usando, la prótesis se ha de guardar en su embalaje original para mantener el producto en óptimas condiciones.

COLOCACION:

1. Asegurarse de la elección de la talla correcta. Las prótesis de mama Máxima están disponibles en varias formas y tamaños (en función de la talla de sostén).
2. La prótesis de mama se puede colocar directamente sobre la piel, adquiriendo rápidamente la temperatura corporal del cuerpo, o dentro de la funda de algodón para proteger las pieles sensibles de irritaciones por roce.
3. Ponga un especial cuidado en la colocación, ya que una caída puede generar daños o roturas en la prótesis.
4. La prótesis se ha de usar con sostenes especiales diseñados para tal efecto.
5. Los objetos afilados, tales como agujas, imperdibles o broches, son susceptibles de generar daños en la prótesis, sobre todo al perforar la capa externa del producto.
6. La prótesis no se ha de usar durante sesiones de radioterapia, ni ser expuesta a temperaturas altas.

CUIDADOS Y LIMPIEZA: Lavar a mano con agua tibia y jabón suave y secar con una toalla suave.