

**ACTIMOVE GILCHRIST PLUS**Referencia **767.**

Inmovilizador de hombro de alta calidad que asegura la estabilización de la parte superior del brazo en posición de aducción. El diseño sólido y abierto facilita las labores de higiene así como la inspección de las posibles heridas.

**INDICACIONES:**

- Luxación con fractura.
- Lesión del manguito rotatorio.
- Fractura subcapital o de la cabeza del húmero.
- Como apoyo a procesos post-operatorios.

TALLA	REFERENCIA	DISTANCIA AXILA-NUDILLOS
S	76759	48-52 cm
M	76760	50-56 cm
L	76761	54-60 cm
XL	76762	58-68 cm

## PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR LAS BARRAS DE CONEXIÓN AXILO-ILIACAS EN EL CORSÉ MODULAR T2780

- **Paso 1:** Colocar el corsé en posición vertical. (Imagen 1)
- **Paso 2:** Retirar todo el acolchado a excepción de las almohadillas paravertebrales de tal modo que el marco de la estructura de soporte pélvica y axilar quede totalmente libre. (Imagen 2)
- **Paso 3:** Dependiendo del grado de extensión en el cual desea colocar el corsé, lo cual determina la posición del tronco del paciente, es preciso identificar los puntos en donde se realizarán los agujeros, tanto en la estructura pélvica como en la estructura axilar. En estos puntos serán donde se sitúen los tornillos que fijarán la barra de conexión. (Imagen 3)
- **Paso 4:** Volver a colocar todo el acolchado poniendo un especial cuidado en realizar un corte para la fijación de la barra de conexión. (Imagen 4)
- **Paso 5:** Colocar las bisagras laterales en ambos lados y apretar los tornillos. (Imagen 4)

